

業務用 医療・介護施設用洗浄剤

メディプロ デイリーケア クリーナー

第四級アンモニウム塩配合

手すりやドアノブから、イスなどの備品、床まで
施設の拭き掃除も除菌・ウイルス除去*もこの1本で。



700ml



希釈タイプ

簡単希釈

二度拭き不要




LION

除菌
ウイルス除去*


希釈液で拭き取るだけ!

すすぎ、二度拭き不要

手すりやドアノブ

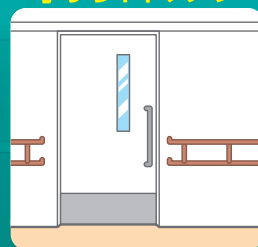

手術室の床など

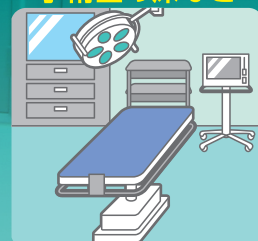

待合室の床や椅子など



商品特長

- 1 専用スプレー容器に1プッシュ。簡単希釈で、濃度調整ミス無く使えます。
- 2 200倍に薄めて使用するので、コストパフォーマンスに優れます。(専用スプレー容器約230本分)
- 3 菌とウイルスを拭き取り除去*。次亜塩素酸ナトリウム希釈液や消毒用エタノールでは落としにくい汚れにも高い洗浄力を発揮し、しっかり拭き取れます。

*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

ライオンハイジーン株式会社



デイリーケアクリーナー

第四級アンモニウム塩配合

医療
介護施設用



700ml

洗浄性能


次亜塩素酸ナトリウム希釈液や消毒用エタノールでは
落とすのが大変な“血液汚れ”や“皮脂汚れ”もしっかり除菌洗浄！

血液洗浄力


汚 垢：ヒツジ血液をPP板に滴下し、乾燥したものをモデル汚垢板とした。

洗浄方法：各種洗浄剤を含ませたダスターで拭き取りを行った。

洗浄後

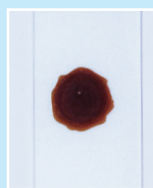

未洗浄

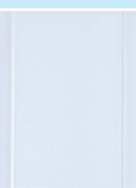

デイリーケア
クリーナー



次亜塩素酸 Na
(1000ppm)



エタノール

皮脂洗浄力

汚 垢：モデル皮脂汚垢をステンレス板に滴下し、乾燥したものをモデル汚垢板とした。

洗浄方法：各種洗浄剤を含ませたダスターで拭き取りを行い、残留した汚れを色素で染色した。


洗浄後



未洗浄



デイリーケア
クリーナー

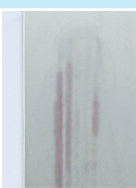

次亜塩素酸 Na
(1000ppm)



エタノール

●ウイルス除去試験*

	ウイルス A (非エンペローフタイプ)		ウイルス B (エンペローフタイプ)	
	ウイルス数 (TCID50/試験担体)	除去効果(%)	ウイルス数 (TCID50/試験担体)	除去効果(%)
乾燥直後	2.6×10^6		6.7×10^6	
デイリーケア クリーナーで 拭き取り後	1.4×10^4	99	1.5×10^3	99.9

試験機関：(一財)北里環境科学センター 北生発：2017-0354号

〈試験方法〉各種菌、ウイルス液を接種、乾燥させたプレートを試験品にて5往復拭き取り後、残存菌、ウイルスを回収し、測定した。

※除去効果：(a-b)/a×100 (a:乾燥直後の菌数、ウイルス数 b:試験試料で拭き取り後の菌数、ウイルス数)

*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

●除菌試験*

	グラム陰性桿菌 A		グラム陽性球菌 B	
	菌数 (cfu/試験担体)	除去効果(%)	菌数 (cfu/試験担体)	除去効果(%)
乾燥直後	5.5×10^6		1.8×10^7	
デイリーケア クリーナーで 拭き取り後	1.5×10^4	99	5.3×10^2	99.99

試験機関：(一財)北里環境科学センター 北生発：2017-0051号

使用場面

床、ドアノブ、手すり、ベッドの柵、蛇口等、施設内における硬質表面の除菌洗浄

使えないもの

●銅、真鍮製の部分 ●ニス塗りの部分 ●水がしみこむ白木、家具、床、壁など ●大理石等の天然石 ●皮革

注意するもの

●ペイント塗りや、ゴム製の部分は影響がないか目立たない部分で試してから使う。
●ワックス処理した床は、剥離の恐れがあるため、必ず目立たないところで試してから使う。

使い方

①スプレー容器またはバケツ等に希釈液をつくる。

【専用スプレー容器の場合】スプレー容器の600mlの高さまで水を入れる。ポンプを1プッシュ(約3ml)し、液を入れ、スプレーを装着し、閉めた後、よく振って混ぜる。

【バケツなどの場合】200倍の希釈液をつくる。水3Lに、ポンプを5プッシュ(約15ml)分入れてよくかき混ぜる。

②布などにスプレーして対象物を拭くか、対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。
バケツなどに希釈した液をモップや布などにつける場合は、よく絞った後に対象物を拭く。

■梱内容

品名	容量	梱入数	寸法(mm)		重量(kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
メディプロ デイリーケア クリーナー	700ml	6	幅 100 高さ 205 奥行 76	幅 238 高さ 216 奥行 204	0.8	5.4	ボトル：PE ポンプ：PP、PE ラベル：PE	4903301274964

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社：〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL 03(6739)9050 (大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2023年4月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。

無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。